



Программа штата Северная Каролина для младенцев и детей ясельного возраста
**начните действовать сразу, чтобы обеспечить им
лучшее будущее**

Программа проката вспомогательных устройств

Инструкции по уходу и очистке

Важной частью ухода за вспомогательным устройством является очистка после каждого использования или на регулярной основе. Правильный уход за устройством и его очистка помогут вашей семье в полной мере пользоваться его преимуществами. Они также помогают обезопасить ребенка.

Если производитель предоставил инструкции по очистке устройства, необходимо им следовать. В противном случае следуйте приведенным ниже рекомендациям.

- Для очистки устройства используйте чистящие салфетки, нанесенный на бумажное полотенце антисептик или слегка влажную губку. Не распыляйте чистящие средства прямо на устройство.
- Избегайте использования слишком большого количества жидкости или жестких чистящих средств, которые могут повредить устройство.
- После очистки протрите устройство насухо тканью.



Если каждый из нас будет правильно ухаживать за вспомогательными устройствами, взятыми в пункте проката, и как следует их очищать, они смогут принести пользу всем семьям и детям.

Дополнительные советы

- Если устройство не работает должным образом или вы заметили какие-либо проблемы (например, ослабленные детали, отсутствующие ремни), обратитесь к координатору услуг раннего вмешательства (EISC).
- Если устройство работает от аккумулятора, выключайте его, когда им не пользуетесь.
- Не открепляйте части устройства, такие как ремни и крышки аккумуляторов, во время пользования, чтобы не потерять их.





Контактная информация Управления по вопросам развития детей (CDSA):

Имя EISC:

